



## Instruções de Utilização com Atectura Breezhaler

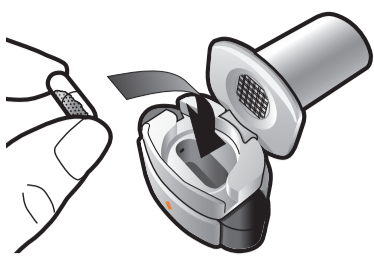


**Insira**

**1**

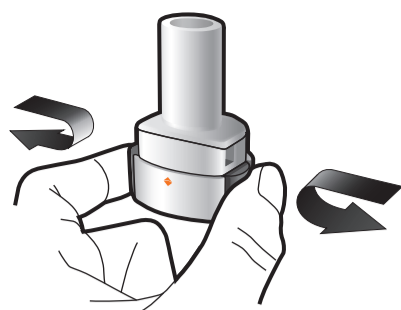


**Perfure e solte**

**2**

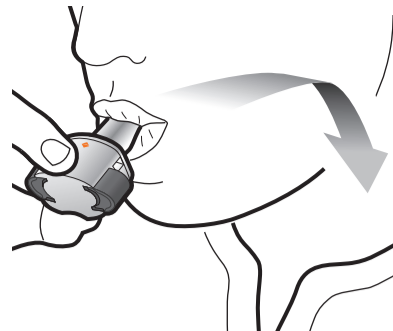


**Inale profundamente**

**3**

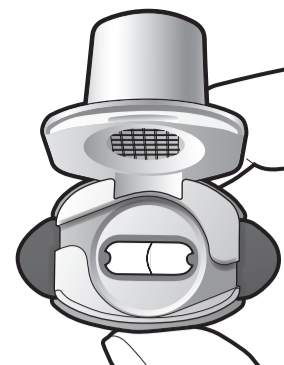

**Verifique se a cápsula está vazia**


**Verificar**

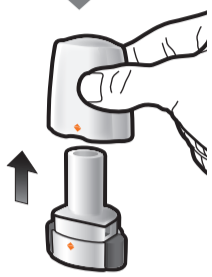


Passo 1a:  
**Retire a tampa**




Passo 1b:  
**Abra o inalador**

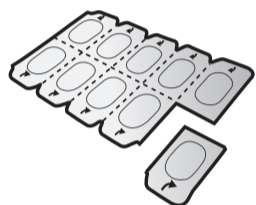


Passo 1c:  
**Remova a cápsula**  
Separe um dos blisters da tira.  
Retire a película protetora do blister e retire a cápsula.  
Não pressione a cápsula através da película de alumínio.  
Não engula a cápsula.

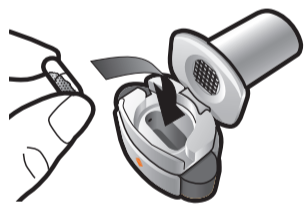

Passo 1d:  
**Insira a cápsula**  
Nunca coloque a cápsula diretamente no aplicador bucal.

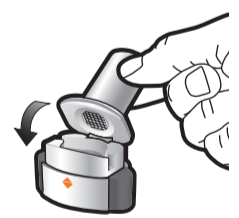

Passo 1e:  
**Feche o inalador**

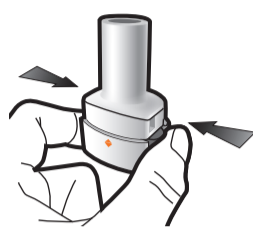

Passo 2a:  
**Perfure a cápsula uma vez**  
Segure o inalador verticalmente.  
Perfure a cápsula pressionando firmemente ambos os botões laterais ao mesmo tempo.  
Deve ouvir um barulho quando a cápsula for perfurada.  
Perfure a cápsula apenas uma vez.



Passo 2b:  
**Solte os botões laterais**



Passo 3a:  
**Expire totalmente**  
Não sopre para o inalador.




Passo 3b:  
**Inale profundamente o medicamento**  
Segure o inalador conforme a figura.  
Coloque o aplicador bucal na boca e feche os lábios firmemente à volta do aplicador bucal.  
Não pressione os botões laterais.  
Inspire rapidamente e o mais profundamente que conseguir.  
Durante a inalação vai ouvir um zumbido.  
Poderá sentir o sabor do medicamento enquanto inspira.



Passo 3c:  
**Sustenha a respiração**  
Sustenha a respiração durante pelo menos 5 segundos.

Passo 3d:  
**Lavar a boca**  
Bocheche com água após cada administração.

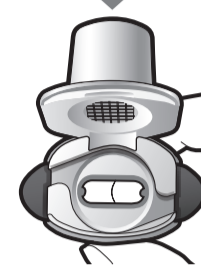


**Verifique se a cápsula está vazia**  
Abra o inalador para verificar se ainda existe algum pó na cápsula.  
Se ainda existir pó na cápsula:  
• Feche o inalador.  
• Repita os passos 3a a 3d



**Pó remanescente**

**Vazia**

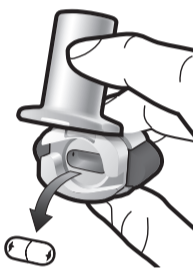


**Retire a cápsula vazia**  
Coloque a cápsula vazia no seu lixo doméstico.  
Feche o inalador e reponha a tampa.

### Informação Importante

- As cápsulas de Atectura Breezhaler devem ser sempre conservadas no blister e apenas devem ser retiradas imediatamente antes da utilização.
- Não pressione a cápsula através da película de alumínio para a retirar do blister.
- Não engula a cápsula.
- Não utilize as cápsulas de Atectura Breezhaler com qualquer outro inalador.
- Não utilize o inalador de Atectura Breezhaler para tomar qualquer outro medicamento em cápsula.
- Nunca coloque a cápsula na sua boca ou no aplicador bucal do inalador.
- Não pressione os botões laterais mais do que uma vez.
- Não sopre para o aplicador do bucal.
- Não pressione os botões laterais enquanto inala através do aplicador bucal.
- Não manuseie as cápsulas com as mãos molhadas.
- Nunca limpe o seu inalador com água.

A sua embalagem de Atectura Breezhaler contém:

- Um inalador de Atectura Breezhaler
- Um ou mais blisters, cada um contendo 10 cápsulas de Atectura Breezhaler para serem usadas com o inalador

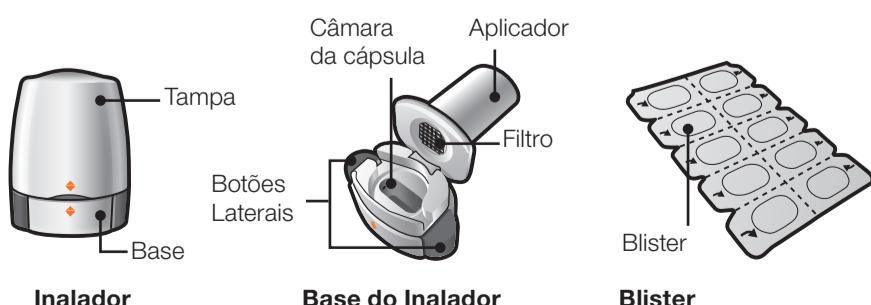

**Inalador**

**Base do Inalador**

**Blisters**

### Perguntas Frequentes

#### Porque é que o inalador não fez um barulho quando inalei?

A cápsula pode estar presa na câmara da cápsula. Se tal acontecer, solte cuidadosamente a cápsula batendo na base do inalador. Inale novamente o medicamento, repetindo os passos 3a a 3d.

#### O que devo fazer se existir pó remanescente dentro da cápsula?

Não tomou a quantidade suficiente do seu medicamento. Feche o inalador e repita os passos 3a a 3d.

#### Eu tossi após a inalação – isso importa?

Tal pode acontecer. Desde que a cápsula esteja vazia, você recebeu quantidade suficiente do seu medicamento.

#### Senti bocados pequenos da cápsula na minha língua – isso importa?

Tal pode acontecer. Não é prejudicial. A probabilidade da cápsula se partir em pequenos bocados aumenta se a cápsula for perfurada mais do que uma vez.

### Limpar o inalador

Limpe o aplicador bucal por dentro e por fora com um pano limpo, seco e sem pelos para remover qualquer resíduo de pó. Mantenha o inalador seco. Nunca limpe o seu inalador com água.

### Eliminação do inalador após uso

Cada inalador deve ser eliminado após todas as cápsulas terem sido utilizadas. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os inaladores que já não necessita.