



Před použitím přípravku Atectura Breezhaler si, prosím, přečtěte celý návod k použití.

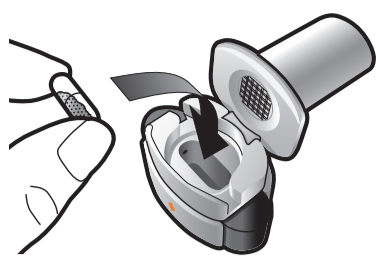


Vložte

1

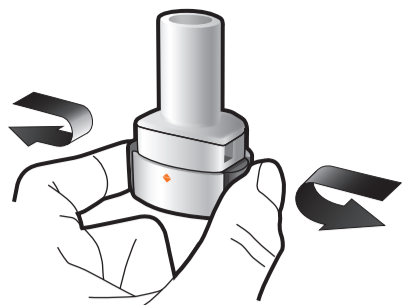


Propíchněte a uvolněte

2

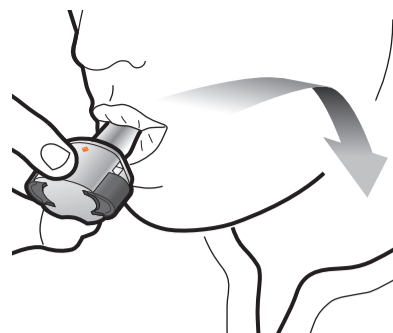


Hluboce vdechujte (inhalujte)

3

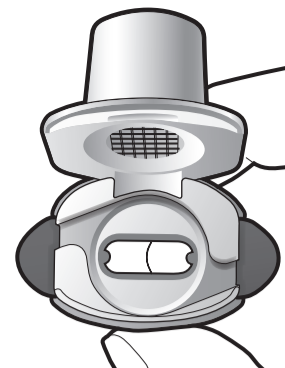


Zkontrolujte tobolku, zda je prázdná



Zkontrolujte

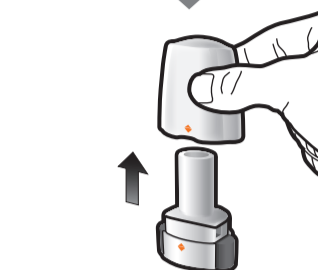


Krok 1a:
Sejměte víčko

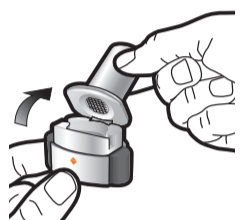

Krok 1b:
Otevřete inhalátor

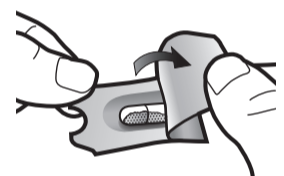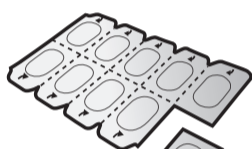


Krok 1c:
Vyjměte tobolku
Odtrhněte jeden z blistrů z karty blistru.
Ze zadní strany stáhněte ochrannou fólii a vyjměte tobolku.
Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii.
Tobolku nepolykejte.

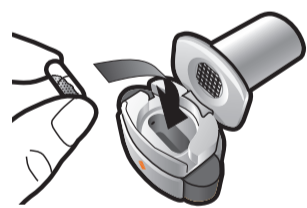

Krok 1d:
Vložte tobolku
Nikdy nevkládejte tobolku přímo do náustku.



Krok 1e:
Uzavřete inhalátor

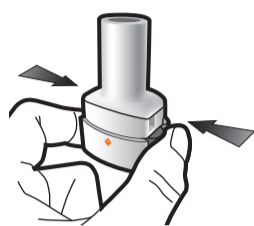

Krok 2a:
Jedenkrát propíchněte tobolku
Držte inhalátor ve vzpřímené poloze.
Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek.
Měl(a) byste slyšet zvuk vzniklý propichováním tobolky.
Tobolku propíchněte pouze jednou.



Krok 2b:
Uvolněte postranní tlačítka



Krok 3a:
Zhluboka vydechněte
Do náustku nefoukejte.




Krok 3b:
Hluboce inhalujte lék
Držte inhalátor tak, jak je znázorněno na obrázku.
Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty.
Nemačkejte postranní tlačítka.
Vdechujte rychle a co nehlouběji můžete.
Během inhalace budete slyšet hrčivý zvuk.
Jak lék inhalujete, můžete pocítit jeho příchut.



Krok 3c:
Zadržte dech
Zadržte dech na 5 sekund.

Krok 3d :
Vypláchněte si ústa
Vypláchněte si ústa vodou po každé dávce a vyplivněte ji.

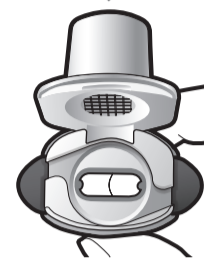


Zkontrolujte, zda je tobolka prázdná
Otevřete inhalátor a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.
Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:

- Uzavřete inhalátor.
- Opakujte kroky 3a až 3d.

 **Zbýlý prášek**

 **Prázdná**

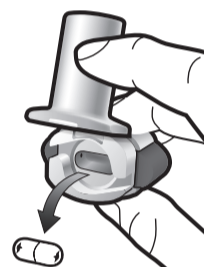

Vyjměte prázdnou tobolku
Prázdnou tobolku odložte do domovního odpadu.
Uzavřete inhalátor a nasadte víčko.

Důležité informace

- Tobolky přípravku Atectura Breezhaler musí být vždy uchovávány v kartě blistru a vyjmuty pouze těsně před použitím.
- Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii, abyste ji vyjmul(a) z blistru.
- Tobolku nepolykejte.
- Nepoužívejte tobolky přípravku Atectura Breezhaler s jiným inhalátorem.
- Nepoužívejte inhalátor Atectura Breezhaler k užívání tobolek jiného léku.
- Nikdy nevkládejte tobolku do úst nebo náustku inhalátoru.
- Postranní tlačítka nemačkejte více než jednou.
- Do náustku nefoukejte.
- Nemačkejte postranní tlačítka, když inhalujete přes náustek.
- Nedotýkejte se tobolek mokřými rukama.
- Nikdy nemyjte inhalátor vodou.

Balení přípravku Atectura Breezhaler s inhalátorem obsahuje:

- Jeden inhalátor Atectura Breezhaler
- Jednu nebo více karet blistru, každá obsahuje 10 tobolek přípravku Atectura Breezhaler k použití v inhalátoru



Inhalátor

Tělo inhalátoru

Karta s blistry

Časté dotazy

Proč inhalátor nedělal hluk, když jsem inhaloval(a)?

Tobolka se mohla v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde, opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Opět inhalujte lék opakováním kroků 3a až 3d.

Co mám dělat, pokud zůstane prášek uvnitř tobolky?

Neinhaloval(a) jste dostatek léku. Uzavřete inhalátor a opakujte kroky 3a až 3d.

Po inhalaci jsem kašlal(a) – vadí to něčemu?

To se může stát. Pokud je tobolka prázdná, inhaloval(a) jste dostatek léku.

Cítil(a) jsem malé kousky tobolky na jazyku – vadí to něčemu?

To se může stát. Není to škodlivé. Možnost roztříštění tobolky na malé kousky se zvyšuje, pokud je tobolka propíchnuta více než jednou.

Čištění inhalátoru

Otřete náustek zevnitř i zvenku čistým, suchým kouskem látky, která nepouští vlákna, abyste odstranil(a) zbytky prášku. Uchovávejte inhalátor v suchu. Nikdy nemyjte inhalátor vodou.

Likvidace inhalátoru po použití

Každý inhalátor je třeba zlikvidovat poté, co byly použity všechny tobolky. Zeptejte se svého lékaře, jak zlikvidovat léky a inhalátory, které již nejsou více potřeba.